



# PLAN DE URGENCIAS OCULAR

TIPO DE LESIONES	SOLUCIÓN DE LAVADO RECOMENDADA	SEGUIR ENJUAGANDO HASTA SER ATENDIDO POR UN MEDICO	TIPO DE LAVADO ACONSEJADO
<b>Cuerpos extraños</b> (P.ej. partículas de polvo, suciedad o virutas metálicas y de madera, etc.)	Plum Eye Wash	Plum Eye Wash	Enjuagar el tiempo necesario hasta extraer el cuerpo extraño.
<b>Lesiones con ácidos</b>	pH Neutral	Plum Eye Wash	Enjuagar primero con pH Neutral durante 2 minutos y continuar con Plum Eye Wash hasta ser atendido por un médico.
<b>Lesiones con alcalinos</b>	pH Neutral	Plum Eye Wash	Enjuagar primero con pH Neutral durante 2 minutos y continuar con Plum Eye Wash hasta ser atendido por un médico.
<b>Otra lesiones</b> (P.ej. disolventes y aceites)	Plum Eye Wash	Plum Eye Wash	Enjuagar el tiempo necesario hasta que desaparezcan las molestias. Seguir enjuagando el ojo hasta ser atendido por un médico.
<b>Lesiones en la piel</b> causadas por ácidos, alcalinos o sustancias químicas.	pH Neutral	Plum Eye Wash	Enjuagar la piel con pH Neutral durante 2 minutos o hasta que quede vaciada la botella. Seguir enjuagando con Plum Eye Wash hasta ser atendido por un médico.



pH Neutral



Plum Eye Wash



1. Retire la botella de la estación.



2. Gire la tapa en sentido de la flecha hasta romper el precinto de seguridad.



3. Inclina la cabeza hacia atrás y presionar la botella.



4. O bien incline la cabeza hacia delante si no quiere que se moje la ropa.

## ¡Importante!

El líquido lavajos debe penetrar en el ojo con un flujo suave y uniforme. Presione la botella ligeramente, sin ejercer demasiada presión. Consulte con su médico en caso de cualquier lesión o contaminación ocular. El lavado ocular debe seguir realizándose durante el trayecto al médico.